


# ΜΥΗΙΧΕΛ

Ο απόλυτα φυσικός τρόπος αντιμετώπισης  
της πρόωρης εκσπερμάτισης

# Τι είναι το MyHixel;

- Καινοτόμο, ιατροτεχνολογικό προϊόν
- Απευθύνεται σε άνδρες με πρόωρη εκσπερμάτιση έως και κάτω του ενός λεπτού
- Βελτίωση χρόνου εκσπερμάτισης έως και 7 φορές
- Ισπανικής προέλευσης

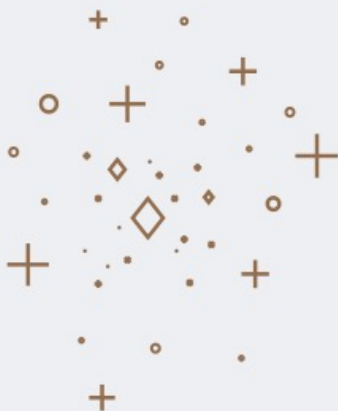

FDA Registered



CE Marked

MYHIXEL


# Πώς λειτουργεί το MyHixel;



- Συσκευή ΜΥΗΙΧΕΛ Ι
- Εφαρμογή με πρόγραμμα ασκήσεων σε περιβάλλον παιχνιδιού, μεταφρασμένη στα Ελληνικά

**CBT - Cognitive Behavioral Therapy**


**SCT - Sphincter Control Training**

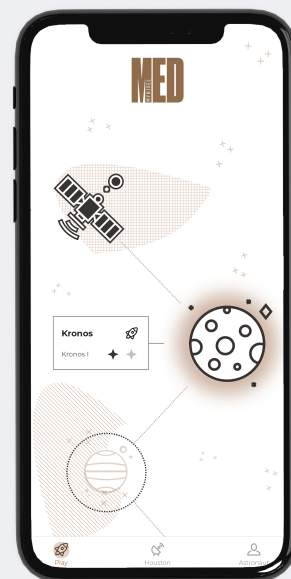

**ΜΥΗΙΧΕΛ**

# Αποτελεσματικότητα

- Επιστημονικά τεκμηριωμένη
- Προϋπόθεση: η ολοκλήρωση του προγράμματος
- Διάρκεια: 8 – 10 εβδομάδες
- Σύσταση για αποχή από ερωτική επαφή με σύντροφο

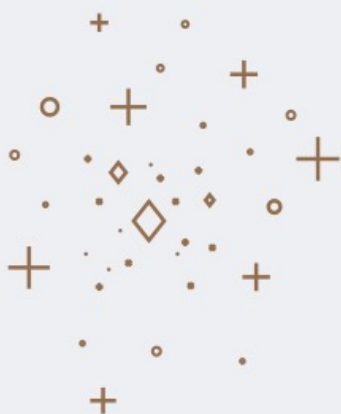


**2.000 άνδρες συμμετείχαν στις μελέτες**

**8.000 άνδρες έχουν ήδη τη δική τους συσκευή MyHixel**

**ΜΥΗΙΧΕΛ**

# Η συσκευή ΜΥΗΙΧΕΛ Ι

- Θερμαινόμενη
- Με λειτουργία δονήσεων

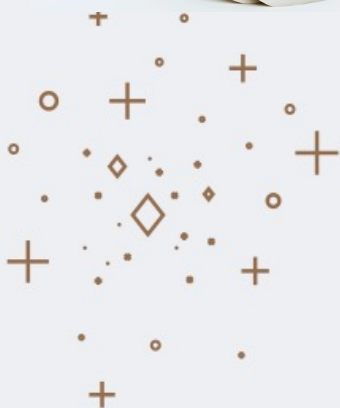


- Μαλακός και εξαιρετικά εύκαμπτος εσωτερικός κύλινδρος
- Υφή κόλπου
- Απαραίτητη η χρήση λιπαντικού με βάση το νερό
- Καθαρισμός του εσωτερικού κυλίνδρου μετά από κάθε χρήση

ΜΥΗΙΧΕΛ

# Φυσικοθεραπεία και πρόωρη εκσπερμάτιση

- Εντοπισμός point of no return
- Start – stop
- Squeeze (πίεση βαλάνου)
- Σε συνδυασμό φαρμακευτική αγωγή, αναισθητικές αλοιφές, αντικαταθλιπτικά
- Περιορισμοί: Μόνιμη σύντροφος; Αυνανισμός;

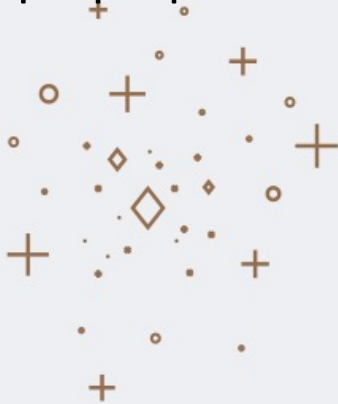


Το MyHixel δεν έχει περιορισμούς στη χρήση του και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε θεραπεία

ΜΥΗΙΧΕΛ

# Τεχνική MyHixel

**Sensate Focus:** ερεθίσματα που προσομοιάζουν στην ερωτική διέγερση, τη διείσδυση και την ερωτική επαφή.  
Απευαισθητοποίηση του πέους

**MYHIXEL Method:**  
**scientifically proven**

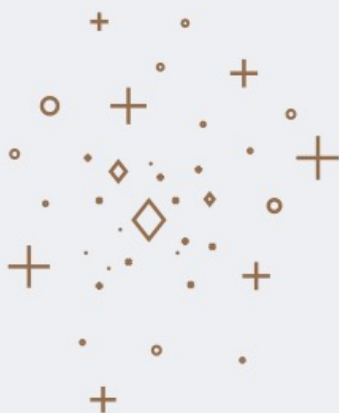


**Sphincter Control Training:** το αντανακλαστικό της εκσπερμάτισης ξεκινάει με ανάπτυξη υψηλής πίεσης στην προστατική ουρήθρα. Point of no return και έλεγχος του έξω σφιγκτήρα της ουρήθρας

**MYHIXEL**

# Ο ρόλος του ειδικού

- Ενημέρωση για την εναλλακτική MyHixel
- Συνεχής επικοινωνία με τον άνδρα για την πρόοδο
- Συμπληρωματική αγωγή

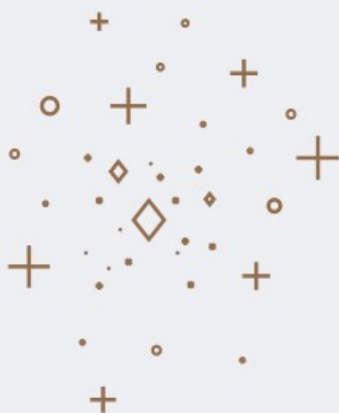

Ο ρόλος σας είναι κρίσιμος,  
ο ασθενής αγοράζοντας το  
MyHixel δεν εξαφανίζεται

ΜΥΗΙΧΕΛ