

CORAZOR®

UROMED BIOPSIE SCHUSSGERÄT

REF 6020 / 6060

Die Innovation in punktgenauer Biopsie.

UROMED Biopsy Device – The Innovation in accurate biopsy.

Zur Biopsie und Entnahme von Weichgewebe


- hohe Federspannung für kraftvolles Eindringen und optimale Gewebeausbeute
- Auslöser für Halb- oder Voll-Automatik
- aufwendige Entsicherung entfällt durch spezielle Druckpunkt-Sperre
- hervorragend einhändig bedienbar
- leichtes Spannen
- leise in der Anwendung
- Deckelöffnung per Knopfdruck
- Einschusstiefe wahlweise 15 oder 22 mm
- Anzeige des Spannstatus
- maßgeschneiderter Einsatz mit »CORAZOR®« Stanzbiopsie-Kanülen

For biopsy and soft tissue sampling


- high spring tension for powerful puncture and optimized tissue samples
- triggers for automatic or semi-automatic sampling
- time extensive release is not necessary due to special pressure point protection
- excellent one-handed use
- easy cocking
- quiet application
- opening of the cover by pushing the button
- optional penetration depth 15 or 22 mm
- status of the device is shown on the cocking indicator
- customised application with »CORAZOR®« Puncture Biopsy Cannulas




Passgenaues Einlegen, sichere Handhabung, beste Ergebnisse.
Precise insertion, safe handling, best results.

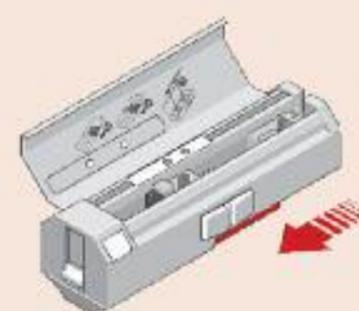

1 Vor (!) dem Einsetzen der Kanüle wird das Punktionsgerät **zweimal** bis zum Anschlag gespannt.
Before (!) inserting the cannula the biopsy device has to be cocked **twice** up to the limit.

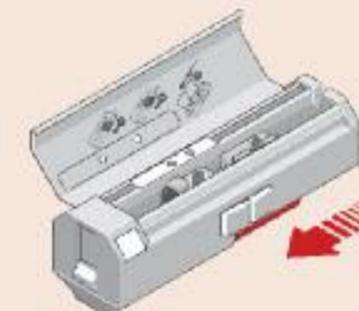

2 Nach dem zweiten Spannen ist das Gerät bereit zur Aufnahme der Kanüle.
After the second cocking the device is ready to insert the cannula.

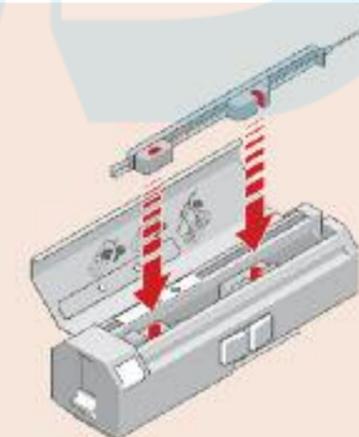

3 Kanüle einlegen und den Deckel schließen. Ein Entsichern ist nicht nötig – die Punktion kann mit einer Hand durchgeführt werden.
Insert cannula and close the cover. Safety release is not necessary – the puncture can be carried out with one hand.

REF anwendbar mit »CORAZOR®«-Stanzbiopsie-Kanülen
REF usable with »CORAZOR®« puncture cannulas

6020.00 / 6060.00 Größen siehe vorherige Seiten
for sizes please turn back

Verpackung: unsteril
Verpackungseinheit: 1 Stück
Original-Karton: 1 Stück

Packing: unsterile
Packing unit: 1 piece
Original carton: 1 piece